

فهرست کتابچه راهنمای کاربر

ورود	3
تنظیمات	3
تنظیمات سایت	4
تنظیمات پرو فایل	4
فیلتر زمان	5
فیلتر وضعیت گزارش	5
فیلتر جنسیت	6
فیلتر دستگاه	6
فیلتر وضعیت بیمار	7
ایجاد گزارش	7
ویرایش گزارش	8
مشاهده و چاپ گزارش	8
مشاهده سریع	9
مشاهده پیشرفته	9
قابلیت همزمان نمایش سری ها و گزارش	10
بازگردانی به تنظیمات اولیه	10
تاریخچه کامل	11
گزارش های من	11
شبیه	12

12.....نمایش رکورد ها


13.....بازدید مجدد از پرونده

13.....راهنمای ابزار

14.....راهنمای ابزار


ورود به سینا پکس

نام کاربری و رمز ورود که از مسئول بخش گرفته اید را وارد کنید و روی دکمه ورود کلیک کنید

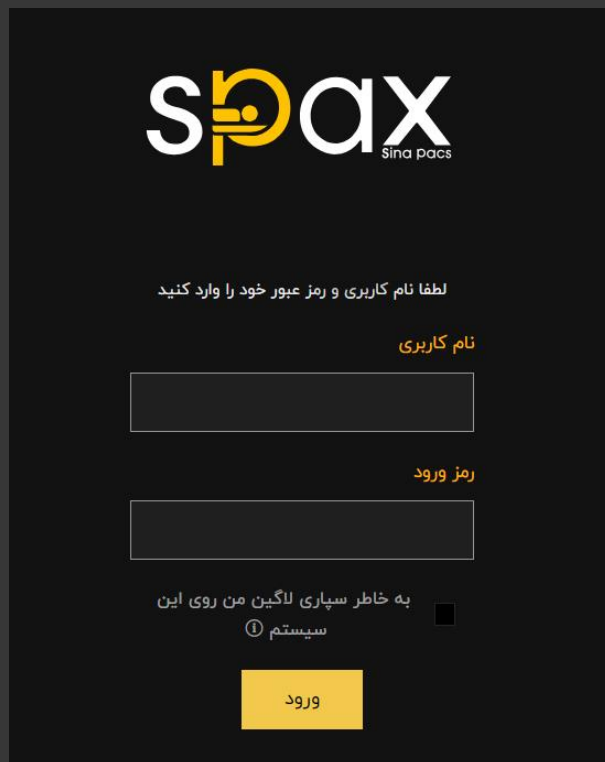

The login screen for Sina Pax features the company logo at the top. Below it, a prompt asks the user to enter their username and password. There are two input fields: one for the username (labeled 'نام کاربری') and one for the password (labeled 'رمز ورود'). A checkbox for 'به خاطر سپاری لاگین من روی این سیستم' (Remember my login on this system) is located below the password field. A yellow 'ورود' (Login) button is at the bottom.

تنظیمات: با زدن این آیکون می توانید به پنل تنظیمات سایت و پروفایل دسترسی داشته باشید

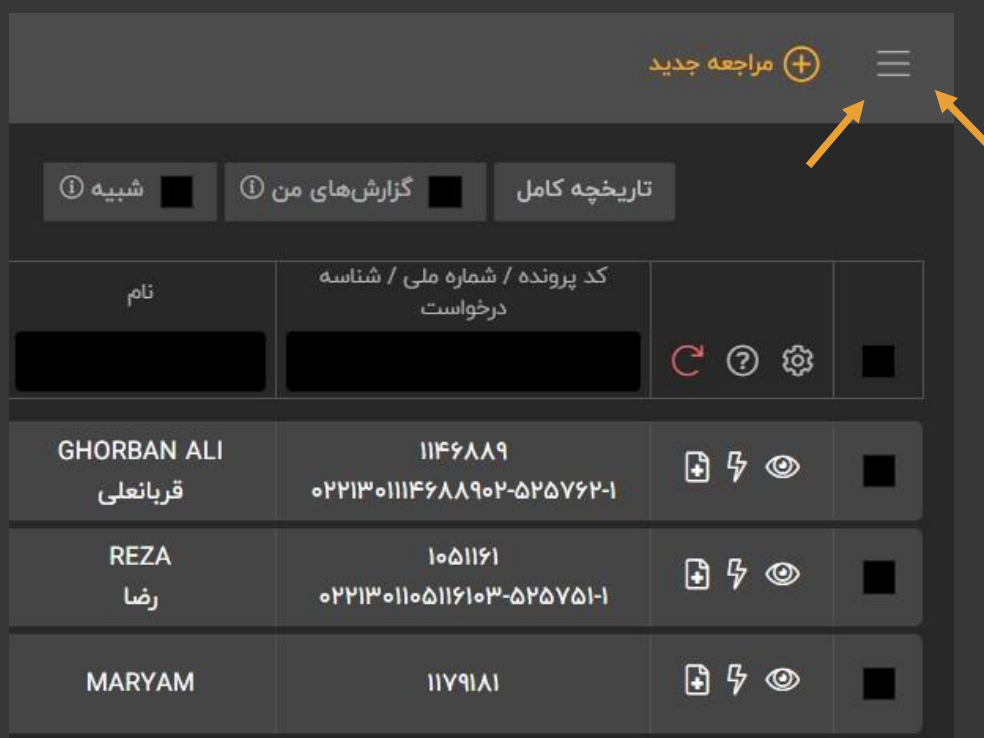

The user management interface includes a top bar with a '+ مراجعه جدید' (New referral) button and a hamburger menu icon. Below this are three filter buttons: 'شبیه' (Similar), 'گزارش های من' (My reports), and 'تاریخچه کامل' (Full history). The main area is a table with columns for 'نام' (Name), 'کد پرونده / شماره ملی / شناسه درخواست' (File code / National ID / Request ID), and action icons. Two orange arrows point to the hamburger menu icon and the first row of the table.

نام	کد پرونده / شماره ملی / شناسه درخواست		
GHORBAN ALI قربانعلی	۱۱۴۶۸۸۹ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۴۶۸۸۹۰۲-۵۲۵۷۶۲-۱	🔄 ? ⚙️	■
REZA رضا	۱۰۵۱۱۶۱ ۰۲۲۱۳۰۱۱۰۵۱۱۶۱۰۳-۵۲۵۷۵۱-۱	🔄 ⚡ 👁️	■
MARYAM	۱۱۷۹۱۸۱	🔄 ⚡ 👁️	■

سیناپکس انتخاب هوشمند پکس

تنظیمات سایت: با کلیک بر روی تنظیمات سایت می توانید زبان و تقویم را به دلخواه تغییر دهید و توصیه میشود زمانی که در یک مرکز درمانی به صورت لوکال به پکس وصل هستید تیک امکان پیش دانلود را بزنید و اگر با موبایل یا با اینترنت به پکس وصل هستید این گزینه را تیک نزنید به دلیل اینکه پکس کند میشود و دیرتر تصاویر بارگذاری میشوند

تنظیمات کلی

سایت

زبان: English ☐ فارسی ☒

تقویم: میلادی ☐ شمسی ☒


دابل کلیک ☐ ① مشاهده سریع

☒ امکان پیش دانلود فایل وجود داشته باشد

لغو ذخیره

تنظیمات پروفایل: در قسمت تنظیمات پروفایل می توانید رمز ورود کاربری خود را تغییر دهید

و تصویر امضای خود را بارگذاری کنید

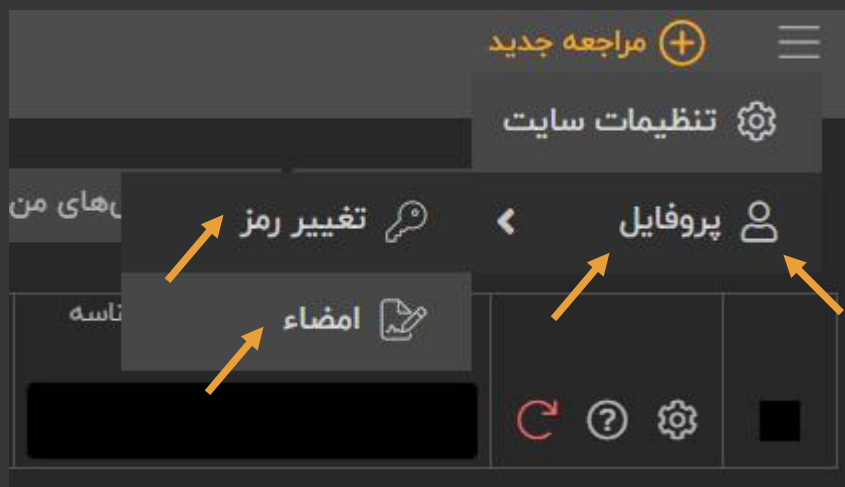

سیناپکسی انتخاب هوشمند پکسی

فیلتر زمان: در این گزینه می توانید زمان را بر اساس فیلدهای موجود (همه ، امروز، ماه ، سال و بازه زمانی) مشخص کنید

توجه: می توانید با انتخاب گزینه از تاریخ تا تاریخ بازه زمانی دلخواهتان را انتخاب کنید

فیلتر وضعیت گزارش: در این گزینه می توانید وضعیت گزارش را مشخص کنید و با کلیک روی زیرکادر فیلتر را اعمال کنید

سیناپکس انتخاب هوشمند پکس

فیلتر جنسیت: با استفاده از این فیلتر و کلیک بر روی هر کدام از آیکون ها می توانید جنسیت مریض را تعیین کنید

جنسیت	وضعیت گزارش	تاریخ
 	همه	
M مرد	N	۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۰:۵۶
M مرد	N	۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۰:۵۲
M مرد	T	۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۰:۲۱
M مرد	N	۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۰:۱۹
M مرد	A	۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۰:۱۷
M مرد	N	۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۰:۱۴
M مرد	N	۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۰:۱۴
M مرد	A	۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۰:۰۲

فیلتر دستگاه: با استفاده از این فیلتر می توانید فیلتر دستگاه های مورد نظر را مشخص کنید و روی هر دستگاهی


که می خواهید پرونده های مربوط به آن را ببینید روی مربع کنار کادر آن کلیک کنید

نام خانوادگی	تاریخ	وضعیت گزارش	جنسیت	دستگاه	وضعیت بیمار	توضیحات	پزشک / کاربر	حجم فایل
		همه	 	همه	همه			

US-R	MG	DDR	CR
XA	MR	DDR-1	CR-D
XA-۲	MRI-1	DDR-۲	CR-R
XA-۳	MRI-۲	DDR-۳	CT
	NM	DDR-۴	CT-1
	SC	DDR-PORTABLE-1	CT-۲
	US	DSA	CTA

سیناپکس انتخاب هوشمند پکس

فیلتر وضعیت بیمار: با این فیلتر می توانید وضعیت مریض را مشخص کنید و با کلیک روی پایین کادر آن فیلتر را اعمال کنید

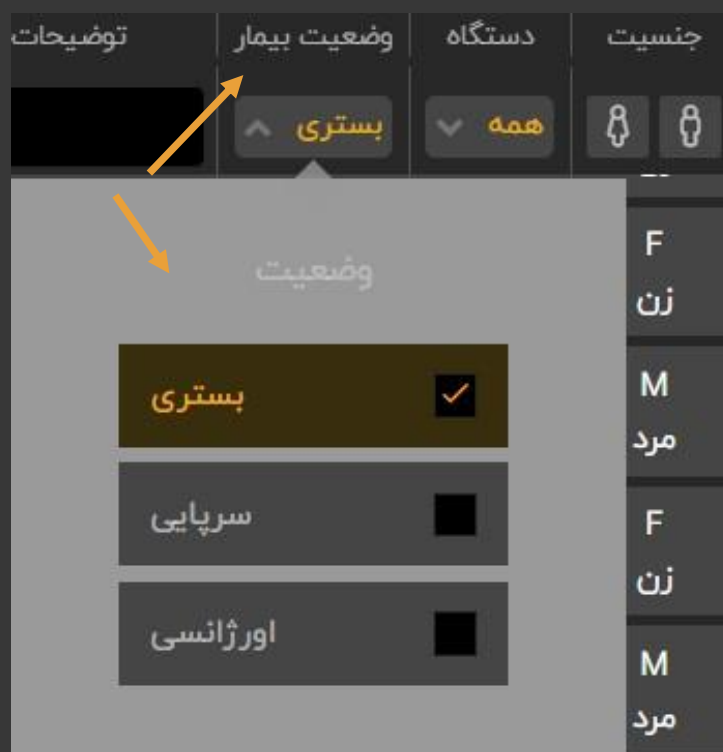

ایجاد گزارش: این گزینه به معنای نداشتن گزارش برای آن پرونده است و با کلیک بر روی آن

می توانید یک گزارش ایجاد کنید

کد پرونده / شماره ملی / شناسه درخواست			
		  	☐
۱۱۷۹۱۷۰		  	☐
۱۱۷۸۵۷۰ ۰۱۱۷۸۵۷۰۰۱-۵۲۵۷۵۵-۱۰۱۱۷۸۵۷۰۰۱-۵۲۵۷۵۵-۱		  	☐
۱۱۷۸۷۲۷ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۸۷۲۷۰۱-۵۲۵۷۳۴-۱		  	☐
۱۱۷۸۷۲۷ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۸۷۲۷۰۱-۵۲۵۷۳۴-۲		  	☐
۱۱۷۸۶۷۸ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۸۶۷۸۰۱-۵۲۵۷۴۵-۱		  	☐

ویرایش گزارش: این گزینه به معنای داشتن گزارش برای آن پرونده است و با کلیک بر روی آن

می توانید گزارش ایجاد شده را ویرایش کنید

کد پرونده / شماره ملی / شناسه درخواست		
۸۰۵۲۶۷ ۱۲۲۱۳۰۱۸۰۵۲۶۷۰۱-۱۶۳۰۴۹-۱	  	☐
۱۱۷۹۱۸۷	   	☐
۷۳۲۵۳۷	  	☐
۱۱۷۴۶۵۳ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۴۶۵۳۰۱-۲۹۴۸۰۰-۱	   	☐
۱۱۷۹۱۱۴ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۹۱۱۴۰۱-۲۹۴۷۸۱-۱	   	☐

مشاهده و چاپ گزارش: این گزینه به معنای داشتن گزارش برای آن پرونده است و با کلیک بر روی آن

می توانید گزارش نوشته شده را مشاهده و چاپ کنید

۱۱۷۸۶۴۸ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۸۶۴۸۰۱-۴۷۸۱۸۹-۱	   	☐
۱۱۷۹۱۱۲ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۹۱۱۲۰۱-۴۷۸۱۹۶-۱	  	☐
۱۱۷۹۲۰۵ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۹۲۰۵۰۱-۲۹۴۷۷۹-۳	   	☐

سیناپکس انتخاب هوشمند پکس

مشاهده سریع: با استفاده از این گزینه می توانید مشاهده سریع به صورت فایل jpg از تصاویر مریض را مشاهده کنید

کد پرونده / شماره ملی / شناسه درخواست		
۱۱۷۸۴۴۴ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۸۴۴۴۰۲-۴۷۸۰۹۸-۱	  	☐
۱۱۷۸۴۴۴ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۸۴۴۴۰۲-۴۷۸۰۹۸-۱	  	☐
۱۱۴۴۹۵۲ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۴۴۹۵۲۰۲-۵۲۵۷۳۷-۱	  	☐
۱۱۷۸۶۴۸ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۸۶۴۸۰۱-۴۷۸۱۸۹-۱	   	☐

مشاهده پیشرفته: با استفاده از این گزینه می توانید نمای پیشرفته فایل دایکام را مشاهده کنید

و از ابزارهای نمایش اندازه گیری و قابلیت بازسازی استفاده کنید

کد پرونده / شماره ملی / شناسه درخواست		
۱۱۷۸۴۴۴ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۸۴۴۴۰۲-۴۷۸۰۹۸-۱	  	☐
۱۱۷۸۴۴۴ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۸۴۴۴۰۲-۴۷۸۰۹۸-۱	  	☐
۱۱۴۴۹۵۲ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۴۴۹۵۲۰۲-۵۲۵۷۳۷-۱	  	☐
۱۱۷۸۶۴۸ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۸۶۴۸۰۱-۴۷۸۱۸۹-۱	   	☐

سیناپکس انتخاب هوشمند پکس

قابلیت همزمان نمایش سری ها و گزارش: برای وقتی که می خواهید گزارشی را تایپ کنید و نیاز به دیدن تصاویر دارید با این قابلیت می توانید همزمان که دارید گزارشی را تایپ می کنید تصاویر سری ها را هم داشته باشید

کد پرونده / شماره ملی / شناسه درخواست		
	  	
۱۱۷۸۴۴۴ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۸۴۴۴۰۲-۴۷۸۰۹۸-۱	  	
۱۱۴۴۹۵۲ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۴۴۹۵۲۰۲-۵۲۵۷۳۷-۱	  	
۱۱۷۸۶۴۸ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۸۶۴۸۰۱-۴۷۸۱۸۹-۱	   	

بازگردانی به تنظیمات اولیه: برای وقتی که فیلتر های مختلف انتخاب کرده اید و می خواهید به فیلتر اولیه برگردید این گزینه را اگر بزنید همه چیز به حالت پیش فرض اول برمیگردد

کد پرونده / شماره ملی / شناسه درخواست		
	  	
۱۱۷۸۴۴۴ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۸۴۴۴۰۲-۴۷۸۰۹۸-۱	  	
۱۱۴۴۹۵۲ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۴۴۹۵۲۰۲-۵۲۵۷۳۷-۱	  	

تاریخچه کامل: جست و جو سایر شماره پرونده های مرتبط با پرونده جستجو شده مورد نظر

(+)
مراجعه جدید

☐ شبیه ⓘ
 ☐ گزارش های من ⓘ
 ☒ تاریخچه کامل

نام	کد پرونده / شماره ملی / شناسه درخواست		
		↺ ? ⚙	☐
TAHERE طاهره	۱۱۷۸۴۴۴ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۸۴۴۴۰۲-۴۷۸۰۹۸-۱	⚡ ⚡ ⚡	☐
GHOLAM HASAN غلام حسن	۱۱۴۴۹۵۲ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۴۴۹۵۲۰۲-۵۲۵۷۳۷-۱	⚡ ⚡ ⚡	☐
NAZAR	۱۱۷۸۴۴۴	⚡ ⚡ ⚡	☐

گزارش های من: اگر نقش استاف یا دستیار یا تایپیست را داشته باشید با کلیک کردن روی این گزینه و فعال سازی تیک آن گزارش هایی که نوشته اید یا تغییراتی در گزارشی داده اید را نمایش می دهد

(+)
مراجعه جدید

☐ شبیه ⓘ
 ☒ گزارش های من ⓘ
 ☐ تاریخچه کامل

نام	کد پرونده / شماره ملی / شناسه درخواست		
		↺ ? ⚙	☐
TAHERE طاهره	۱۱۷۸۴۴۴ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۸۴۴۴۰۲-۴۷۸۰۹۸-۱	⚡ ⚡ ⚡	☐
GHOLAM HASAN غلام حسن	۱۱۴۴۹۵۲ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۴۴۹۵۲۰۲-۵۲۵۷۳۷-۱	⚡ ⚡ ⚡	☐
NAZAR	۱۱۷۸۴۴۴	⚡ ⚡ ⚡	☐

سیناپکس انتخاب هوشمند پکس

شبهه: با استفاده از این گزینه اگر تیک آن را بزنید و حروفی در نام یا نام خانوادگی وارد کنید اسامی کسانی که شبهه نام وارد شده باشند هم نمایش داده میشوند برای مثال شما اگر ماشینی را شین جستجو کنید و تیک را زده باشید پرونده را پیدا میکند

(+)
مراجعه جدید

تاریخچه کامل گزارش‌های من شبهه

نام	کد پرونده / شماره ملی / شناسه درخواست		
TAHERE طاهره	۱۱۷۸۴۴۴ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۸۴۴۴۰۲-۴۷۸۰۹۸-۱	🔄 ? ⚙️	🔍 ⚡ 📄
GHOLAM HASAN غلام حسن	۱۱۴۴۹۵۲ ۰۲۲۱۳۰۱۱۴۴۹۵۲۰۲-۵۲۵۷۳۷-۱	🔄 ? ⚙️	🔍 ⚡ 📄

نمایش رکوردها: با استفاده از این گزینه میتوانید تعداد رکورد نمایش داده شده در هر صفحه را تنظیم کنید روی آن کلیک کنید یک گزینه را انتخاب کنید

بازه زمانی: همه سال ماه هفته ۳ روز امروز از تاریخ تا تاریخ

تاریخچه کامل گزارش‌های من شبهه

حجم فایل	پزشک / کاربر	توضیحات	وضعیت بیمار	دستگاه	جنسیت	وضعیت گزارش	تاریخ	نام خانوادگی	نام	کد پرونده / شماره ملی / شناسه درخواست		
درحال دریافت...	Guest	...EST PA	بستری	DDR-1	M	N	۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۲:۳۸	HOSIN ZADEH	FARAMARZ	۱۱۷۷۸۳۸ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۷۸۳۸۰۱-۵۲۵۷۵۲-۱	🔄 ? ⚙️	🔍 ⚡ 📄
2.0MB	Guest	...EST PA	بستری	DDR-1	F	N	۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۲:۳۵	KHODADAIDIAN	ZAHRA	۱۰۹۶۶۴۲ ۰۲۲۱۳۰۱۰۹۶۶۴۲۰۲-۵۲۵۷۵۶-۱	🔄 ? ⚙️	🔍 ⚡ 📄
125.4MB	...ohehati	...rization		XA-2	M	N	۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۲:۲۸	ALMASI DARBAN	GHOLAMREZA	۱۱۷۹۲۷۲	🔄 ? ⚙️	🔍 ⚡ 📄
1.6MB	Guest	...EST PA	بستری	DDR-1	F	N	۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۲:۱۹	ASHENAEI RODI	MARZIEH	۱۱۷۹۲۵۴ ۰۲۲۱۳۰۱۱۷۹۲۵۴۰۱-۵۲۵۷۴۶-۱	🔄 ? ⚙️	🔍 ⚡ 📄
2.0MB	Guest	... SUPINE	بستری	DDR-1	M	N	۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۲:۱۵	SALAH	ALIASGHAR	۱۱۷۷۵۲۰ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۷۵۲۰۰۲-۵۲۵۷۵۸-۱	🔄 ? ⚙️	🔍 ⚡ 📄
1.8MB	Guest	...EST PA	بستری	DDR-1	M	N	۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۲:۱۳	SALAH	ALIASGHAR	۱۱۷۷۵۲۰ ۰۲۲۱۳۰۱۱۱۷۷۵۲۰۰۲-۵۲۵۷۵۸-۱	🔄 ? ⚙️	🔍 ⚡ 📄
159.9MB	...ohehati	...rization		XA-2	M	N	۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۲:۰۴	ZEBARJADIAN	MOHAMAD BAGHER	۱۱۷۹۱۷۰	🔄 ? ⚙️	🔍 ⚡ 📄
۱۰ اتوماتیک	Guest	...EST PA	بستری	DDR-1	M	N	۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۲:۰۲	MOSAVI	HASAN	۱۱۷۸۵۷۰ ۰۱۱۷۸۵۷۰۰۱-۵۲۵۷۵۵-۱۰۱۱۷۸۵۷۰۰۲-۵۲۵۷۵۵-۱	🔄 ? ⚙️	🔍 ⚡ 📄

فاقد پشتیبانی

نمایش: ۵۰ تایی

نتایج: ۱ - ۵۰

سیناپکس انتخاب هوشمند پکس

بازدید مجدد از پرونده: نقطه قرمز به معنای این است که یوزری که با آن لاگین هستید تا به حال این پرونده را بازدید نکرده است و اگر گزینه مشاهده پیشرفته یا مشاهده سریع را بزنید این نقطه از بین میرود و رنگ رکورد به مشکی تغییر میکند و اگر صفحه را دوباره بارگذاری کنید و رفرش کنید رنگ ها همه دوباره خاکستری میشوند

دستگاه	وضعیت بیمار	توضیحات	پزشک / کاربر	حجم فایل	
همه	همه				
DDR-1	بستری	...EST PA	Guest	درحال دریافت...	⋮
DDR-1	بستری	...EST PA	Guest	2.0MB ۱ مورد	⋮
XA-2		...rization	...ohehati	125.4MB ۷ مورد	⋮
DDR-1	بستری	...EST PA	Guest	1.6MB ۱ مورد	⋮

راهنمای ابزار: در هر قسمت از سایت که این آیکن وجود داشت اگر موس را بر روی آن نگه دارید یک کادر متنی توضیحات مربوط به آن مؤلفه (شرح عملکرد) را نمایش می دهد

تاریخچه کامل

گزارش های من ⓘ

شبیه ⓘ

گزارش هایی که من به عنوان تایپیست، دستیار و یا استاف آنها هستم

نام	کد پرونده / شماره ملی / شناسه درخواست		
		↻ ⓘ ⚙	■

راهنمای ابزار: با نگه داشتن موس بر روی آیکون اسم دستگاه یک کادر متنی مربوط به توضیحات

و اسم آن دستگاه را نمایش می دهد



راهنمای ابزار: با نگه داشتن موس بر روی توضیحات نوشته شده در بخش توضیحات آن را به صورت کامل نمایش می دهد

توضیحات	وضعیت بیمار	دستگاه	جنسیت	وضعیت گزارش
	همه	همه		همه
... SUPINE	بستری	DDR-1	M مرد	N
...EST PA	بستری	DDR-1	M مرد	N
...EST PA	بستری	DDR-1	F زن	N
...rization		XA-2	M	N
Coronary^Diagnostic Coronary Catheterization				
...EST PA	بستری	DDR-1	F زن	N